



درمان
فوتو بایو داینامیک


درمان فوتو بایوداینامیک

درمان فوتو بایوداینامیک جدیدترین معجزه درمانهای زیبایی است. تکنیک انقلابی غیر تهاجمی ای بر مبنای تحریک، بازسازی و ترمیم پوست که حاصل استفاده ترکیبی از دستگاه FOTOAGE و محصولات Skinox است.


قابل دسترس، ساده، بدون درد، بدون عوارض جانبی و با نتایج بی نظیر.



چگونه کار میکند؟

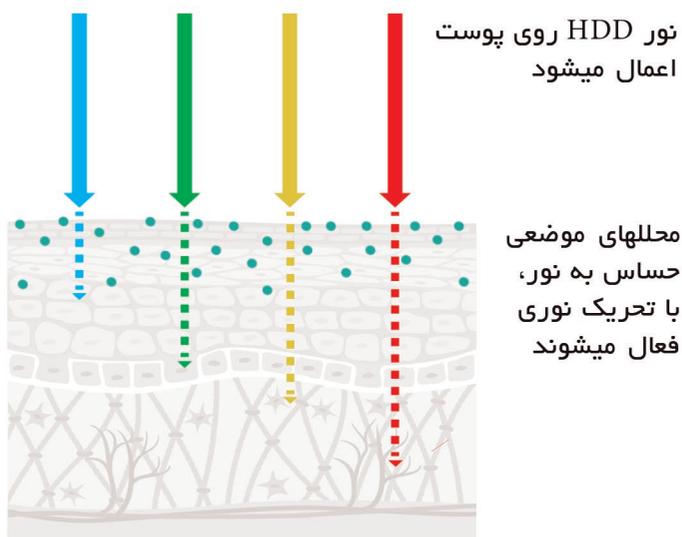


چه درمانهایی میتوانید انجام دهید؟

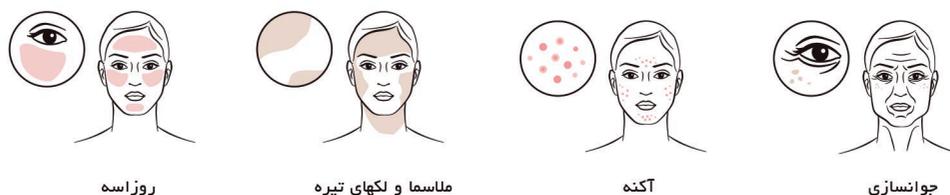

HDD تکنولوژی

HDD یا دایود با چگالی بالا (High Density Diode) نور بسیار قدرتمندتری در مقایسه با LED است که می تواند مقدار بیشتری انرژی را در یک منطقه بزرگتر متمرکز کند. همچنین قادر به انتشار نور تک رنگ خالص است. به همین دلایل، نسبت به سایر انواع درمانهای کروموتراپی مؤثرتر است.

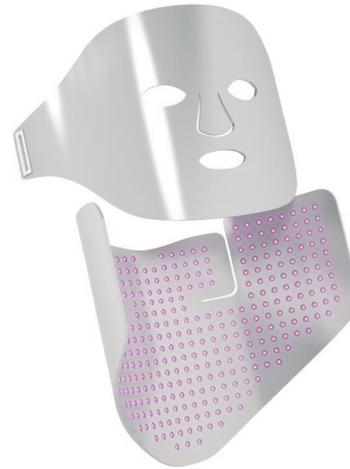

630 +10nm
تحریک کننده کلاژن و الاستین
بازسازی کننده سلول
تحریک کننده جهت رشد مو
ضد التهاب

530 +10nm
مهار کننده ملانین بیش از حد
تحریک کننده کلاژن و الاستین
ضد التهاب

590 +10nm
ضد التهاب
جهت درمان لنفوتروفیک
جهت درمان روزاسه و درماتیت

425 +10nm
آنتی باکتریال
موثر در لایه اپی درمال
مهار کننده رشد لایه شاخی پوست

اندیکاسیون ها

- ✓ کمک درمانی
- ✓ بعد از کربوکسی تراپی
- ✓ درمان آفتاب سوختگی
- ✓ کاهش پیگمانته های پوستی
- ✓ ضد التهاب
- ✓ درمان فوتو داینامیک
- ✓ روزاسه
- ✓ پس از درمان پیلینگ
- ✓ پس از درمان با لیزر
- ✓ اسکار
- ✓ آکنه
- ✓ IPL با درمان

مشخصات فنی

Programs:

- Pulsed energy 73 Hz (Nogier Frequency)
- Pulsed energy 73 Hz (Nogier Frequency)
- Pulsed energy 73 Hz (Nogier Frequency)
- Pulsed energy 584 Hz (Nogier Frequency)

در کل ۲۰۲۴۸ دیود تک رنگ
۵۶۲ دیود چهار رنگ فوکالیزه شده
صورت ۹۲۴ | گردن و دکلته ۱۰۵۴۰

skinox

VYTRUS تکنولوژی

کمپانی SKYMEDIC با کمپانی Vytrus Biotech که آزمایشگاهی با بیش از ۴۰ سال تجربه تخصصی در زمینه تولید عناصر فعال با ارزش افزوده بالا بر اساس فناوری سلولهای بنیادی گیاهی به دست آمده به روش پایدار است همکاری می کند.

گیاهان دارای مجموعه ای از سلولهای بنیادی هستند که می توانند هر بافت آسیب دیده ای را ترمیم کنند. سلول بنیادی توانایی تولید مجدد یک گیاه سالم و کامل را داراست البته اگر در شرایط مناسب رشد کند. کالوس بدین صورت بدست می آید و به کمک آن Skymedic میتواند با روش انجماد سخت مواد اولیه، به درجه خلوصی بالاتر از هر کمپانی دیگری دست یابد.



چین و چروک skinox.

به بازسازی پوست و بهبود آسیب های ناشی از افزایش سن کمک میکند.

درمان در کلینیک

فاز ۱ پیلینگ

pH: 2.0-3.0

مواد خام	عملکرد
Glycolic Acid 20%	درمان کراتولیتیک
Ferulic acid 3%	پوست را مرطوب می کند / فیبروبلاست را تحریک می کند
Mandelic acid 10%	کاهش دهنده پیگمانته های پوستی
Lactic acid 4.5%	درمان کراتولیتیک
Salicylic acid 2%	فیبروبلاست را تحریک می کند
Citric Acid 1%	آنتی باکتریال
Kojic acid 1%	مهار کننده تیروزیناز



پروتکل درمانی: پوست را کاملاً تمیز و عاری از چربی کنید. این مرحله برای بهینه سازی عمل لایه برداری ضروری است. سپس دوز تقریباً ۴ میلی لیتری از محلول لایه بردار را روی صورت، گردن و دکلته اعمال کنید و ۳ دقیقه منتظر بمانید. اگر بیمار دارای پوست بسیار حساس است، زمان کمتری بگذارید. سپس آن را با آب بشویید و پاک کنید.

روش کاربرد: به ویژه توصیه می شود به دلیل خاصیت ژل مانند محلول لایه بردار، با قلم مو استفاده شود.

فاز ۲ سرم فوتوداینامیک

مواد خام	عملکرد
Hyaluronic Acid HW 0.5%	آبرسانی و جوانسازی پوست
Hyaluronic Acid LW 0.4%	آبرسانی و جوانسازی پوست
Colloidal Gold 2%	اثر ضد پیری
ALA 0.1%	اثر ضد پیری
Centella Reversa 3%	اثر ضد پیری
Matrixyl 2%	تحریک کننده فیبروبلاست
Argirelox 10%	اثر تاپتینینگ شبه بوتاکس



پروتکل درمانی: سرم فوتوداینامیک چین و چروک را به میزان دوز ۱ میلی لیتر بر روی صورت و ۱.۵ میلی لیتر روی گردن و دکلته اعمال کنید. ورق پلاستیکی محافظ را روی صورت، گردن و دکلته قرار دهید و آن را به مدت ۱۰ دقیقه در تاریکی رها کنید.

فاز ۳ ماسک Fotoage

پروتکل درمانی: ماسک FOTOAGE را روی لایه ی محافظ پلاستیکی قرار دهید و برنامه انتشار RED COLOR را انتخاب کنید. اجازه دهید دیوهای FOTOAGE به مدت ۱۵ دقیقه عمل کنند (برنامه اتوماتیک است و پس از اتمام خاموش خواهد شد) ماسک Fotoage و لایه محافظ پلاستیکی را بردارید و محلول فاز ۲ را پاک کنید. برای پایان درمان، از ضد آفتاب استفاده کنید.

فاز ۴ FOTOSKINOX® SPF 50+

مواد خام

Liposomed Chemical Filters 15%
Titanium dioxide 3%
Elix-go 2%
Exo P 2%
Delisens 0.1%
Arabiam Cotton 0.5%

عملکرد

اشعه های خورشیدی را جذب می کند و اثر آن را خنثی می کند
یک لایه محافظ روی پوست ایجاد می کند
محافظت کننده در برابر اشعه مادون قرمز
محافظت کننده در برابر آلودگی های محیطی
محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش
محافظت در برابر نور / آنتی اکسیدان



فاز ۵ HYALUROX® Serum

مواد خام

Gold 0.075%
Hyaluronic Acid LW 0.1%
Matrixyl 2%
Nicotinamide 1%
Argirelox 10%
Crosslinked HA 2%
Ascorbyl Glucoside 2%
Turmeria Zen 2%
Centella Reversa 2%
Arabian Cotton 2%

عملکرد

اثر ضد پیری
آبرسان
تحریک کلاژن
با رادیکالهای آزاد مبارزه می کند / آنتی اکسیدان
اثر تایتینینگ شبه بوتاکس
آبرسانی با دوام بالا / از آلاینده ها جلوگیری می کند
تولید کننده ویتامین C
ضد التهاب / بازسازی کننده
تحریک کلاژن
آنتی اکسیدان



پروتکل درمان یک ماهه: سرم Hyalurox و کرم Fotoskinox SPF ۵۰+ را دو بار در روز یک بار صبح و یک بار بعد از ظهر استفاده کنید.



آکنه skinox.

وظیفه ی از بین بردن نقایص ایجاد شده توسط آکنه را به عهده دارد.

درمان در کلینیک

فاز ۱ پیلینگ

pH: 2.0-3.0

مواد خام	عملکرد
Azelaic Acid 10%	آنتی باکتریال
Mandelic Acid 10%	تحریک کننده فیبروبلاست
Salicylic Acid 10%	آنتی باکتریال



پروتکل درمانی: پوست را کاملاً تمیز و عاری از چربی کنید. این مرحله برای بهینه سازی عمل لایه برداری ضروری است. سپس دوز تقریباً ۴ میلی لیتری از محلول لایه بردار را روی صورت، گردن و دکلته اعمال کنید و ۳ دقیقه منتظر بمانید. اگر بیمار دارای پوست بسیار حساس است، زمان کمتری بگذارید. سپس آن را با آب بشویید و پاک کنید.

روش کاربرد: به ویژه توصیه می شود به دلیل خاصیت ژل مانند محلول لایه بردار، با قلم مو استفاده شود.

فاز ۲ سرم فوتوداینامیک

مواد خام	عملکرد
Acido Hialuronico LW 0.5%	آبرسان و جوان کننده
Acido Hialuronico HW 0.3%	اثر آبرسانی عمقی
Extracto Tepezcohuite 5%	آنتی باکتریال
ALA 0.1%	فوتوداینامیک ضد باکتری
Turmeria Zen 2%	ضد التهاب / احیا کننده
Quora Noni 2%	مهار ماکروبیوتیک



پروتکل درمانی: سرم فوتوداینامیک آکنه را به میزان دوز ۱ میلی لیتر بر روی صورت و ۱.۵ میلی لیتر روی گردن و دکلته اعمال کنید. ورق پلاستیکی محافظ را روی صورت، گردن و دکلته قرار دهید و آن را به مدت ۱۰ دقیقه در تاریکی رها کنید.

فاز ۳ ماسک Fotoage

پروتکل درمانی: ماسک FOTOAGE را روی لایه ی محافظ پلاستیکی قرار دهید و برنامه انتشار BLUE COLOR را انتخاب کنید. اجازه دهید دیوهای FOTOAGE به مدت ۱۵ دقیقه عمل کنند (برنامه اتوماتیک است و پس از اتمام خاموش خواهد شد) ماسک Fotoage و لایه محافظ پلاستیکی را بردارید و محلول فاز ۲ را پاک کنید. برای پایان درمان، از ضد آفتاب استفاده کنید.

مراقبت در منزل

صابون تمیز کننده فاز ۴

مواد خام

Turmeria Zen 0.5%
Quora Noni 0.5%
Salicylic Acid 0.5%

عملکرد

ضد التهاب / احیا کننده
مهار ماکروبیوتیک
ضد باکتری / تمیز کننده عمقی



سروم مراقبت در منزل فاز ۵

مواد خام

Tepezcohuite Extract 5%
Cytobiol Bardane 1%
Hyalosome EG-10 2%
Turmeria Zen 2%
Quora Noni 2%

عملکرد

آنتی باکتریال
آنتی باکتریال
آبرسانی Crosslinked HA
ضد التهاب / احیا کننده
مهار ماکروبیوتیک



پروتکل درمان یک ماهه: صابون تمیز کننده (۱ میلی لیتر) را دو بار در روز یک نوبت صبح و یک نوبت شب استفاده کنید، با آب بشویید و خشک کنید. سرم آکنه (۱ میلی لیتر) را دو بار در روز یک نوبت صبح و یک نوبت شب استفاده کنید.



لکهای تیره. skinox.

روشن کننده پوست و بهبود دهنده هایپر پیگمنتیشن

درمان در کلینیک

فاز ۱ پیلینگ

pH: 2.3-3.3

مواد خام

Glycolic Acid 7%
Kojic Acid 5%
Mandelic Acid 10%
Salicylic Acid 2%
Phytic Acid 10%
Tranhexamic Acid 5%

عملکرد

درمان کراتولیتیک
تیروزیناز را مهار می کند
تحریک فیبروبلاست / درمان کراتولیتیک
آنتی باکتریال
درمان کراتولیتیک
تیروزیناز را مهار می کند



پروتکل درمانی: پوست را کاملاً تمیز و عاری از چربی کنید. این مرحله برای بهینه سازی عمل لایه برداری ضروری است. سپس دوز تقریباً ۴ میلی لیتری از محلول لکهای تیره را روی صورت، گردن و دکلته اعمال کنید و ۳ دقیقه منتظر بمانید. اگر بیمار دارای پوست بسیار حساس است، زمان کمتری بگذارد. سپس آن را با آب بشویید و پاک کنید.

روش کاربرد: به ویژه توصیه می شود به دلیل خاصیت ژل مانند محلول لایه بردار، با قلم مو استفاده شود.

فاز ۲ سرم فوتو داینامیک

مواد خام

Hyaluronic Acid LW 0.5%
Hyaluronic Acid HW 0.3%
Nicotinamide 1%
Albatin 0.1%
Melanostatine 4%
Tyrostat 2%
Tranhexamic Acid 2%
Colloidal Gold 2%
Luminia Granatum 1%

عملکرد

آبرسانی سطحی و جوانسازی
آبرسانی عمقی و جوانسازی
مهار کننده تیروکسین / آنتی اکسیدان
تیروزیناز را مهار می کند
تیروزیناز را مهار می کند
تشکیل ملانین را مهار می کند
تیروزیناز را مهار می کند
اثر ضد پیری
آنتی اکسیدان و ضد التهاب



پروتکل درمانی: سرم فوتو داینامیک لکهای تیره را به میزان دوز ۱ میلی لیتر بر روی صورت و ۱.۵ میلی لیتر روی گردن و دکلته اعمال کنید. ورق پلاستیکی محافظ را روی صورت، گردن و دکلته قرار دهید و آن را به مدت ۱۰ دقیقه رها کنید.

فاز ۳ ماسک Fotoage

پروتکل درمانی: ماسک FOTOAGE را روی لایه ی محافظ پلاستیکی قرار دهید و برنامه انتشار GREEN COLOR را انتخاب کنید. اجازه دهید دیوهای FOTOAGE به مدت ۱۵ دقیقه عمل کنند (برنامه اتوماتیک است و پس از اتمام خاموش خواهد شد) ماسک Fotoage و لایه محافظ پلاستیکی را بردارید و محلول فاز ۲ را پاک کنید.

فاز ۴

ماسک برطرف کننده پیگماتته های پوستی

مواد خام

Azelaic Acid 15%
 Ferulic Acid 5%
 Kojic Acid 5%
 Salicylic Acid 2%
 Phytic Acid 1%
 Arbutin 5%
 Albatin 0.1%
 Kopcinol 2%
 Melanostatine 4%
 Tyrostat 2%
 Tranhexamic Acid 5%
 Turmeria Zen 2%
 Arabian Cotton 2%
 Luminia Granatum 1%

عملکرد

درمان کراتولیتیک
 آنتی اکسیدان / رادیکال های آزاد را خنثی می کند
 بر طرف کننده ی پیگماتته های پوستی
 آنتی باکتریال / پاکسازی عمقی
 درمان کراتولیتیک
 تیروکسین را مهار می کند
 تشکیل ملانین را مهار می کند
 مراقبت کننده و مهار کننده
 ضد التهاب / احیا کننده
 محافظت در مقابل نور / آنتی اکسیدان
 آنتی اکسیدان / ضد التهاب



پروتکل درمانی: در کلینیک ۳ میلی لیتر از ماسک را روی صورت اعمال کنید و اجازه دهید تا حداقل ۳۰ دقیقه و حداکثر ۸ ساعت عمل کند. بیمار می تواند آن را با آب در خانه بشوید.

مراقبت در منزل

فاز ۵

FOTOSKINOX® SPF 50+

مواد خام

Liposomed Chemical Filters 15%
 Titanium dioxide 3%
 Elix-go 2%
 Exo P 2%
 Delisens 0.1%
 Arabiam Cotton 0.5%

عملکرد

اشعه های خورشیدی را جذب می کند و اثر آن را خنثی می کند
 یک لایه محافظ روی پوست ایجاد می کند
 محافظت کننده در برابر اشعه مادون قرمز
 محافظت کننده در برابر آلودگی های محیطی
 محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش
 محافظت در برابر نور / آنتی اکسیدان



فاز ۶

FOTOSKINOX® Serum

مواد خام

Nicotinamide 1%
 Albatin 1%
 Melanostatine 4%
 Tyrostat 2%
 Crosslinked Hyaluronic Acid 2%
 Tranhexamic Acid 5%
 Luminia Granatum 0.5%

عملکرد

مهار کننده تیروکسین / آنتی اکسیدان
 مهار کننده تیروکسین
 مهار کننده تیروزیناز
 تشکیل ملانین را مهار میکند
 آبرسانی با دوام بالا / محافظت در برابر آلودگی
 مهار کننده تیروزیناز
 آنتی اکسیدان / ضد التهاب



پروتکل درمان یک ماهه: سرم FOTOSKINOX و کرم FOTOSKINOX SPF ۵۰+ را دو بار در روز یک بار صبح و یک بار بعد از ظهر استفاده کنید.



سرخی. skinox.

با قرمزی پوست مبارزه می کند و باعث رفع التهاب، روزاسه و درماتیت می شود.

درمان در کلینیک

فاز ۱ پیلینگ

pH: 1.7-2.7

مواد خام

Azelaic Acid 15%
Mandelic Acid 5%
Phytic Acid 5%
Lactic Acid 5%

عملکرد

درمان کراتولیتیک
تحریک فیبروبلاست / درمان کراتولیتیک
درمان کراتولیتیک
تیروزیناز را مهار می کند



پروتکل درمانی: پوست را کاملاً تمیز و عاری از چربی کنید. این مرحله برای بهینه سازی عمل لایه برداری ضروری است. سپس دوز تقریباً ۴ میلی لیتری از محلول را روی صورت، گردن و دکلته اعمال کنید و ۳ دقیقه منتظر بمانید. اگر بیمار دارای پوست بسیار حساس است، زمان کمتری بگذارید. سپس آن را با آب بشویید و پاک کنید.

روش کاربرد: به ویژه توصیه می شود به دلیل خاصیت ژل مانند محلول لایه بردار، با قلم مو استفاده شود.

فاز ۲ سرم فوتو داینامیک

مواد خام

Hyaluronic Acid LW 0.5%
Hyaluronic Acid HW 0.3%
Colloidal Silver 0.2%
Melatonin 0.01%
Coralline P 3%
Azeloglicine 5%
Arabian Cotton 2%

عملکرد

آبرسانی سطحی و جوانسازی
آبرسانی عمقی و جوانسازی
اثر ضد پیری
فعال سازی سلول
اکسیژن رسانی به سلول
مرطوب کننده و آنتی باکتریال
آنتی اکسیدان



پروتکل درمانی: سرم فوتو داینامیک سرخی را به میزان دوز ۱ میلی لیتر بر روی صورت و ۱.۵ میلی لیتر روی گردن و دکلته اعمال کنید. ورق پلاستیکی محافظ را روی صورت، گردن و دکلته قرار دهید و آن را به مدت ۱۰ دقیقه رها کنید.

فاز ۳ Fotoage

پروتکل درمانی: ماسک FOTOAGE را روی لایه ی محافظ پلاستیکی قرار دهید و برنامه انتشار YELLOW COLOR را انتخاب کنید. اجازه دهید دیوهای FOTOAGE به مدت ۱۵ دقیقه عمل کنند (برنامه اتوماتیک است و پس از اتمام خاموش خواهد شد) ماسک Fotoage و لایه محافظ پلاستیکی را بردارید و محلول فاز ۲ را پاک کنید. برای پایان درمان، از ضد آفتاب استفاده کنید.

فاز ۴

FOTOSKINOX® SPF 50+

مواد خام

Liposomed Chemical Filters 15%
Titanium dioxide 3%
Elix-go 2%
Exo P 2%
Delisens 0.1%
Arabiam Cotton 0.5%

عملکرد

اشعه های خورشیدی را جذب می کند و اثر آن را خنثی می کند
یک لایه محافظ روی پوست ایجاد می کند
محافظت کننده در برابر اشعه مادون قرمز
محافظت کننده در برابر آلودگی های محیطی
محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش
محافظت در برابر نور / آنتی اکسیدان



فاز ۵

سروم مراقبت در منزل

مواد خام

Hyaluronic Acid LW 0.5%
Crosslinked Hyaluronic Acid 2%
Melatonin 0.01%
Coralline P 3%
Azeloglicine 5%
Arabian Cotton 2%

عملکرد

آبرسانی
آبرسانی با دوام بالا / محافظت در برابر آلودگی
فعال سازی سلول
اکسیژن رسانی به سلول
مرطوب کننده و آنتی باکتریال
آنتی اکسیدان



پروتکل درمان یک ماهه: سرم سرخی و کرم Fotoskinox SPF 50+ را دو بار در روز یک بار صبح و یک بار بعد از ظهر استفاده کنید.





واحد ۰۱، پلاک ۵۰۴
بین هوپزه و سرمد، سهرودری شمالی
+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۶۶۳۲۲
info@shafazar.com

www.shafatajhiz.ir

Isaac Peral, 91
08224 Terrassa, Barcelona
+34 937 426 424
info@skymedic.eu

www.skymedic.eu